



製造販売 ニプロ株式会社

医療機器の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

単回使用採血用針「ルアーアダプター付きセーフタッチPSVセット」
単回使用一般静脈用翼付針「セーフタッチPSVセット」
自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット「ニプロ輸液セット」
ご使用に関する注意喚起

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

今般、弊社が製造販売しております単回使用採血用針「ルアーアダプター付きセーフタッチ PSV セット」、単回使用一般静脈用翼付針「セーフタッチ PSV セット」におきまして、抜針時の誤刺防止機構作動時に翼がウイングプロテクタより外れ、医療従事者に針刺し切創が発生した事象の報告を受領しました。

このことを受け、2026 年 1 月 28 日及び 2026 年 2 月 4 日にご案内を行い、自主回収に着手しています。

その後も継続して製造所で調査を進めた結果、新たに組立機のプログラムの不具合による同事象発生の可能性を発見しました。この件に関しては、発生原因が当初の原因とは異なり、発生頻度も低いことから、下記対象製品につきまして、翼がウイングプロテクタより外れないことをご確認いただき、ご使用くださいますようお願い申し上げます。

医療関係者の方々におかれましては、多大なるご心配・ご迷惑をお掛けいたしますこと深くお詫び申し上げます。

謹白

記

対象製品：

- ・ルアーアダプター付きセーフタッチ PSV セット
(医療機器製造販売認証番号: 220AABZX00324000)
- ・セーフタッチ PSV セット
(医療機器製造販売認証番号: 219AABZX00291A01)
- ・ニプロ輸液セット
(医療機器製造販売認証番号: 219AABZX00039000)
※セーフタッチ PSV セットが付属する品番のみ

対象品番：

商品コード	JAN コード	商品名
06-901	4987458069017	セーフタッチ PSV V21GX3/4 ハード*
06-902	4987458069024	セーフタッチ PSV V22GX3/4 ハード*
06-903	4987458069031	セーフタッチ PSV V23GX3/4 ハード*
06-914	4987458069147	セーフタッチ PSV セット V21GL ホルター*ツキ (300mm)
06-915	4987458069154	セーフタッチ PSV セット V22GL ホルター*ツキ (300mm)
06-916	4987458069161	セーフタッチ PSV セット V23GL ホルター*ツキ (300mm)
06-804	4987458068041	ユエキセット ISA-V200CP22 ST Z
06-805	4987458068058	ユエキセット ISA-V200CP23 ST Z
06-807	4987458068072	ユエキセット ECO ISE-V200ST22Z
06-808	4987458068089	ユエキセット ECO ISE-V200ST23Z

対象の製造番号： 末尾に「P」の文字が付いたもの 例： 25J06A**P**

【翼がウイングプロテクタより外れないことの確認方法】

①ウイングプロテクタを把持する



②翼を把持する



③ウイングプロテクタを軸に翼を回転させる。



翼が回転するものは、翼がウイングプロテクタより外れる可能性が高いため、ご使用をお控えくださいますようお願い申し上げます。

製造販売 ニプロ株式会社
大阪府摂津市千里丘新町3番26号

お問い合わせ先 医療機器情報室
TEL 0120-226-410
受付時間：9時～17時15分（土・日・祝日を除く）